


МОЛОКООТСОС БЕСПРОВОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Инструкция по применению

Электронный молокоотсос раотта предназначен для сцеживания и сбора грудного молока.

Важно: если молоко не приходит или его мало, рекомендуется пройти медицинское обследование и получить консультацию специалиста.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

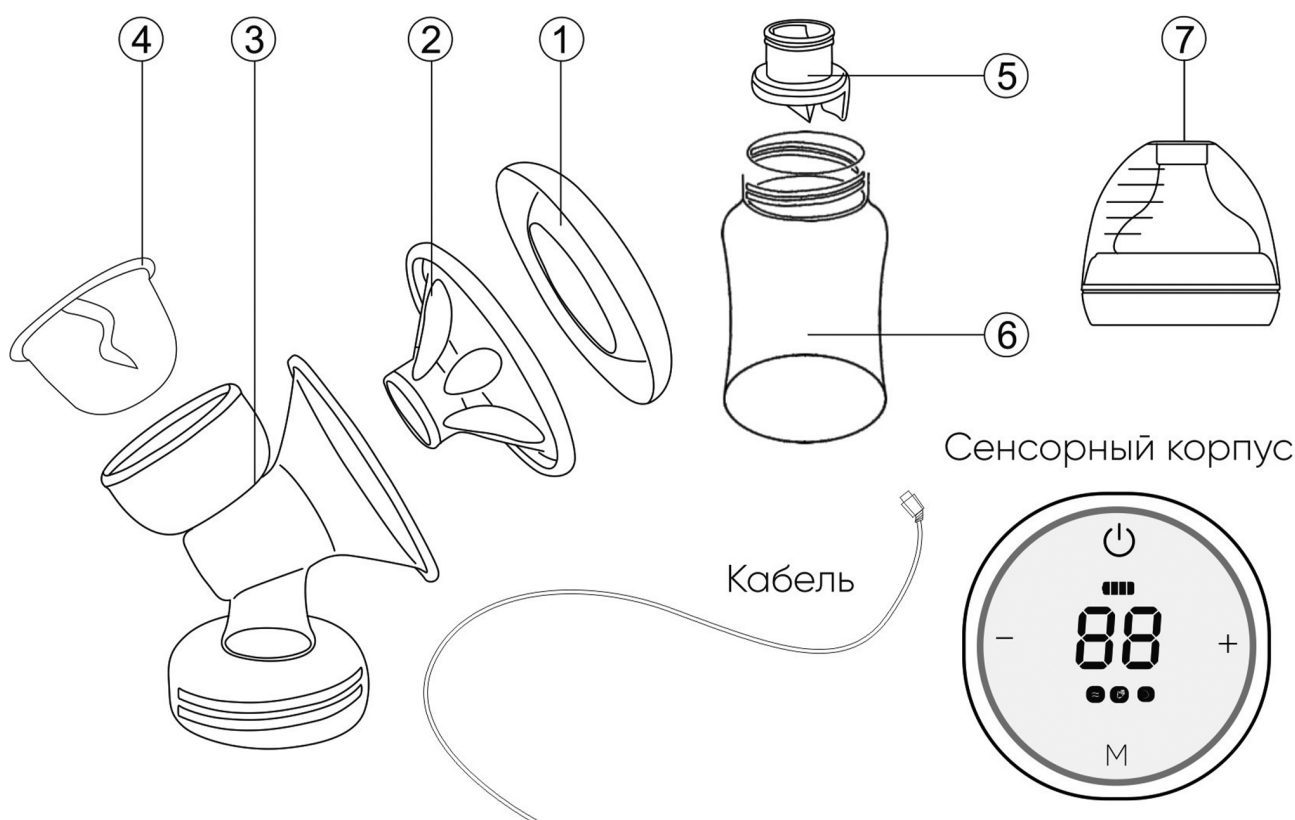

Наименование	Материал	Max t, °C	Кол-во, шт.
1. Пылезащитный колпачок	Полипропилен	120 °C	1
2. Массажная помпа	Силикон	200 °C	1
3. Соединительная часть	Полипропилен	120 °C	1
4. Мембрана	Силикон	200 °C	1
5. Клапан	Силикон	200 °C	1
6. Бутылочка для кормления	Полипропилен	120 °C	1
7. Соска	Силикон	200 °C	1


ПОДГОТОВКА И СБОРКА

Перед первым использованием очистите и продезинфицируйте все детали. Дезинфицируйте детали перед каждым использованием.


Примечание: Обязательно простерилизуйте все детали молокоотсоса и тщательно вымойте руки прежде чем приступить к сборке.

Будьте осторожны, очищенные компоненты могут оставаться горячими.

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРИВЕДЕННУЮ НИЖЕ СХЕМУ СБОРКИ

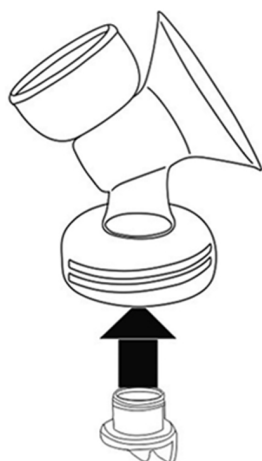

1. Вставьте клапан в нижнюю часть разъема

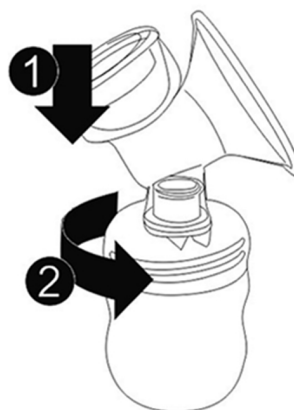


2. Прикрутите разъем к бутылочке для кормления до тех пор, пока он не будет полностью закреплен



3. Вставьте мембрану в верхнюю часть разъема. Нажмите на мембрану, чтобы закрепить ее.



4. Вставьте корпус молокоотсоса в верхнюю часть разъема и нажмите на него, чтобы закрепить.

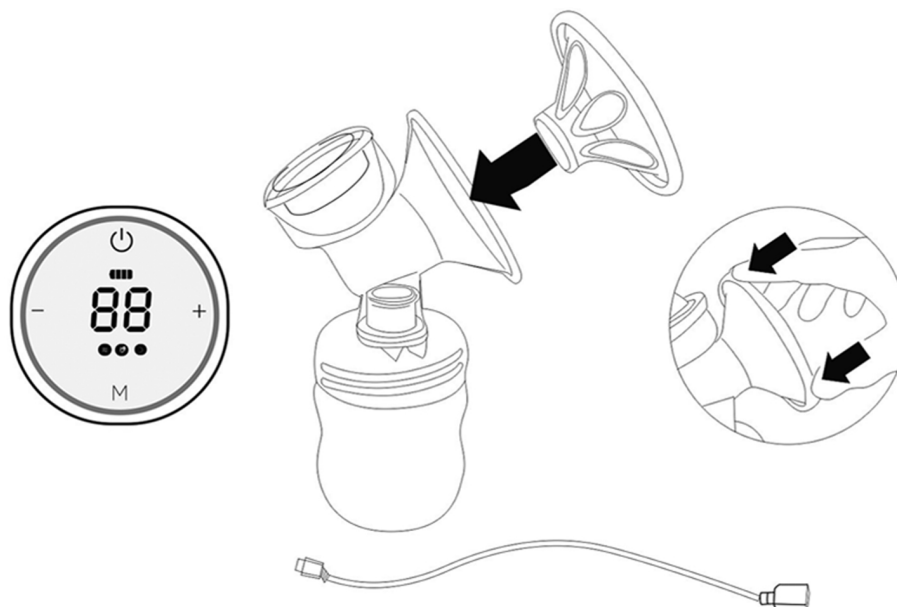

5. Вставьте массажную помпу в воронкообразную часть грудного щитка, надавите и убедитесь, что помпа идеально прилегает. Нажмите на «лепестки», чтобы удалить остатки воздуха, и, наконец, подключите адаптер питания к корпусу.

РЕШЕНИЕ ТИПИЧНЫХ ПРОБЛЕМ

Недостаточное всасывание	Проверьте, не поврежден ли клапан при сборке (обратите внимание, что при чистке его не следует сильно тереть) и убедитесь, что силиконовая мембрана и накладки надежно прикреплены к основному корпусу молокоотсоса для достижения идеальной герметичности. Проверьте не перекрыт ли силиконовый клапан (деталь №5, засорение молоком). Перед каждым использованием необходимо проверять его целостность и проходимость.
Не удается сцедить молоко	Попробуйте расслабиться, а затем повторите попытку через несколько минут. По мере того, как вы используете устройство все чаще и чаще, вам будет легче сцеживать молоко. Возможно, придется попробовать несколько раз, прежде чем у вас получится использовать молокоотсос. Смотрите советы по успешному сцеживанию в шестой главе. В процессе использования мембрана и клапан изнашиваются и нуждаются в замене. За заменой обращаться в бот заботы roomta.
Боль в груди при сцеживании	При возникновении боли вы можете провести полноценную массажную стимуляцию (режим массаж), а затем понизить уровень мощности всасывания при сцеживании молока. При сохранении дискомфорта рекомендуем проконсультироваться с врачом или экспертом по грудному вскармливанию.
Не включается электронный блок	Проверьте правильность подключения кабеля питания и убедитесь, что адаптер питания включен в розетку. Зажмите кнопку вкл./выкл на 2 секунды. Кнопка вкл./выкл не включается от быстрого прикосновения. Используйте только кабель из комплекта и адаптер характеристиками (5V=1A).
Намокание электронного блока	Отключите адаптер питания от розетки. Выключите электронный блок нажав кнопку «вкл./выкл». Не переворачивайте электронный блок – панель управления должна быть вверх. Поместите устройство в сухое теплое место на 24 часа. Оберегайте устройство от прямых солнечных лучей. Не пытайтесь ускорить процесс сушки, применяя источники тепла.
На молокоотсосе появились царапины	На новом экране есть защитная пленка, которую необходимо снять перед использованием. Появление неглубоких царапин при нормальном использовании – это обычное явление, которое не вызывает проблем. Не используйте абразивные или антибактериальные моющие средства, так как они могут вызвать серьезное повреждение пластика.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОКООТСОСА

Когда сцеживать грудное молоко

- Если нет специальных назначений, рекомендуется подождать, пока лактация и режим кормления стабилизируются — обычно это занимает 2–4 недели после рождения.

В исключительных случаях

- Если болит грудь (болезненность/припухлость), сцедите небольшое количество перед кормлением или между кормлениями, чтобы облегчить боль и помочь ребёнку легче сосать.
- Если сосок болит или потрескался, можно использовать помпу после того, как сосок заживёт.
- Если вы временно разлучены с ребёнком, но планируете продолжать грудное вскармливание, важно сцеживаться регулярно, чтобы поддерживать выработку молока.

ПРОСТЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- Нажмите кнопку питания, чтобы включить режим стимуляции. Нажмите кнопку ещё раз, чтобы перейти в экспресс-режим, а затем нажмите ещё раз, чтобы перейти в режим массажа.
- Режим массажа (всего 9 уровней)
- Режим стимуляции (всего 9 уровней)
- Экспресс-режим (всего 9 уровней)

При каждом нажатии кнопки на экране отображается текущий уровень. По умолчанию устройство автоматически выключается через 30 минут. При зарядке дисплей аккумулятора будет мигать, а после полной зарядки на нем отобразится полная шкала.

Молока в бутылочке не должно быть слишком много, чтобы оно не выходило за пределы клапана.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Тщательно вымойте руки и убедитесь, что ваша грудь чистая. Постарайтесь расслабиться и сядьте в удобное кресло. Для удобства можно использовать подушку под спину. Убедитесь, что рядом с вами стоит стакан с водой.
2. Осторожно возьмите грудь, приложите силиконовую накладку и убедитесь, что ваша грудь находится по центру, а массажная подушечка плотно прилегает.

3. Нажмите кнопку вкл/выкл, экран загорится после загрузки. Насос автоматически переходит в режим массажа, нажмите +/– для выбора силы. Когда молоко начнет вытекать, переключите устройство на режим сцеживания и выберите наиболее комфортную силу всасывания.
4. После окончания сцеживания выключите молокоотсос и аккуратно извлеките из него основной корпус.
5. Открутите бутылочку от основного корпуса молокоотсоса, чтобы подготовить ее к кормлению/ хранению. Следуйте инструкциям, приведенным в главе "Чистка и дезинфекция", чтобы почистить другие использованные детали молокоотсоса.
6. Отсоедините основной корпус.

ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- Перед первым использованием и после каждого сцеживания очищайте все детали, которые соприкасаются с молоком: массажную помпу, соединительную часть, мембрану и клапан, бутылочку с соской.
- Полностью разберите молокоотсос. Не используйте острые предметы.
- Промойте съемные детали теплой водой с добавлением небольшого количества мягкого моющего средства, затем тщательно ополосните чистой водой.
- Для дезинфекции съемных деталей:
можно мыть в посудомоечной машине (в верхней корзине);
можно стерилизовать в паровом стерилизаторе;
можно обдать кипятком.
Убедитесь, что все детали полностью высохли перед сборкой.

ВНИМАНИЕ: моторный блок и USB-кабель нельзя мыть, погружать в воду или стерилизовать. Протирайте мотор сухой или слегка влажной мягкой салфеткой, не допуская попадания влаги внутрь корпуса и в разъём.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное изделие является личным предметом.

Не передавайте его другим, чтобы не навредить здоровью.

Будьте осторожны при снятии или соединении деталей, не прилагайте чрезмерных усилий.

Не подвергайте изделие воздействию солнечных лучей и храните в недоступном для детей месте.

Имейте в виду, что мытье основного двигателя категорически запрещено.

Для того, чтобы молокоотсос служил вам долгое время, необходимо обслуживать его как и любое другое техническое устройство.

Молокоотсос raomma прост в обслуживании и нуждается в своевременной замене расходных деталей.

Мембрана и клапан. Если вы заметили потерю вакуума и уменьшение силы всасывания, пришло время заменить данные детали.

Накладка на грудь. Необходимо заменить при износе и деформации силиконового ободка.

Если у Вас возникли вопросы в процессе молокоотсоса, обратитесь в чат-бот поддержки бренда.



ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

1. Неосторожное или неправильное использование.
2. Ущерб, причиненный непреодолимой силой стихийных бедствий.